



Unidades Odontologicas DEOCA



REQUISITOS PREINSTALACIÓN

Tomar en cuenta los siguientes parámetros para la correcta instalación y funcionamiento de la unidad

Parámetros Técnicos

Diseño de alimentación principal ideal para redes de corriente alterna estándar con fusible protector integrado para sobrecargas.

Alimentación / Fusible 110 V 60 Hz | 5A

Voltaje Soportado 110 V $\pm$ 12 V

REQUISITOS PREINSTALACIÓN

Logística, Entorno y Límites

Dimensión del equipo 2.00mts x 1.75mts

Espacio mínimo requerido 3mts x 3mts

Dimensión de la caja
93.5x1.08mtx1.36mt

Peso 130 kgs

REQUISITOS PREINSTALACIÓN

Suministro Neumático

Especificaciones de flujo y presión de aire limpio requeridos para alimentar piezas de alta y baja velocidad.

Presión de aire de entrada: Rango requerido de 0,5 MPa a 0,8 MPa (equivalente a 5,0~8,0 bar o 72,5~116 PSI) para un flujo estable.

Caudal de suministro: Flujo constante ≥ 50 L/min para garantizar el correcto uso simultáneo de las piezas de mano.

Presión regulada de salida: Trabajo de alta velocidad optimizado a 0,25 MPa y de baja velocidad a 0,85 MPa.

REQUISITOS PREINSTALACIÓN

Suministro de Agua

Presión hidráulica requerida: Debe estar calibrada en el rango estable de 0,2 MPa ~ 0,4 MPa (200~400 kPa / 29~58 PSI).

Calidad de la fuente de agua: Para garantizar la durabilidad de las electroválvulas, se recomienda agua filtrada libre de sedimentos.

Tubería de drenaje de salida:
Recomendable un declive mínimo del 2% utilizando tubos de PVC 2" sanitario para evitar retornos molestos.

REQUISITOS PREINSTALACIÓN

Materiales y capacidad logística que debe tomar en cuenta:

- Toma corriente 110V con conexión a tierra física independiente
- Tubería de PVC o manguera de alta presión de 1/2" con llave de paso
- Punto de agua blanca con filtro de sedimentos y llave de paso 1/2"
- Área mínima de 3m x 3m libre de obstáculos
- Regulador de voltaje de alta capacidad o protector térmico
- Puertas con un ancho mínimo de 90cm para el ingreso del equipo, o ascensor en caso de estar en pisos superiores (contar con personal de carga para subir el equipo)
- Disposición de basura para desechar los residuos de ensamblaje, que será responsabilidad del cliente

COSTOS ADICIONALES

TOMA EN CUENTA ESTO

Podemos ayudarte con la logistica



Envio: Tenemos una red de transportistas a tu disposicion para hacerte llegar el equipo . Costo varia dependiendo del estado en el que te encuentres

Instalacion: Nuestro servicio tecnico esta capacitado para ayudarte en el proceso de conexión de tuberias, instalacion de compresores, bombas de succion etc.

Caleteros: En caso de requerir la movilizacion de la unidad desde el pie de camion hacia un edificio o donde se ubique tu consultorio.

Tus mejores aliados...

Considerar 1560mm del punto R hasta el punto P
R - Intersección entre el punto D y el eje central del sillón
P - Punto de trabajo del apoyo de la cabeza

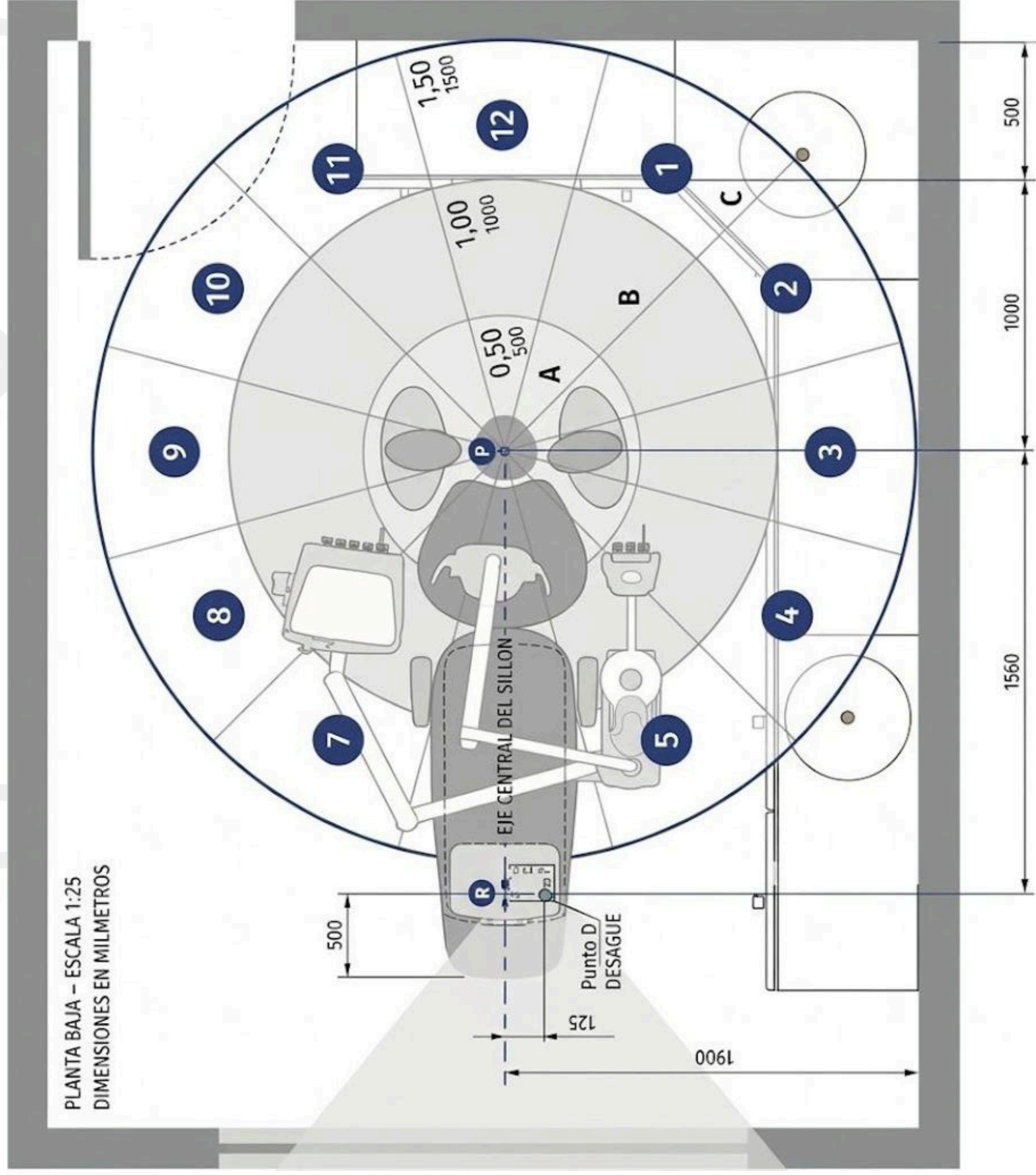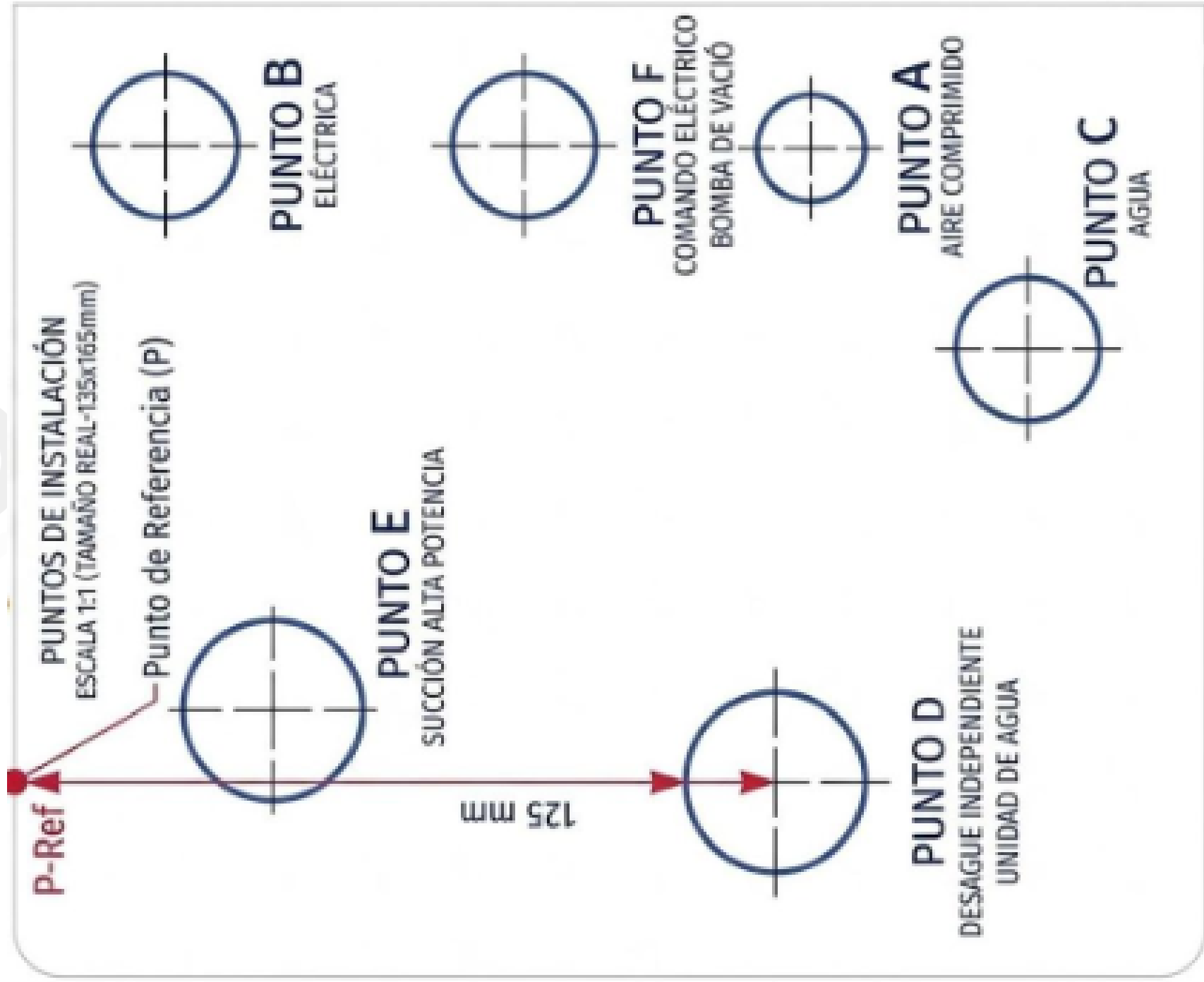

¡Gracias por confiar en nosotros!

Por favor, asegúrese de que la preinstalación esté lista y validada antes del arribo del equipo

Preguntas o Consultas

 [0414-5029331](tel:0414-5029331)

BOADENTVZLA.COM