




Panoramico, Cefalico y Tomografos OWANDY




PROTOCOLO PREINSTALACION

Buscando garantizar una instalacion adecuada, eficiente y sin contratiempos de los equipos radiologicos se recomienda:

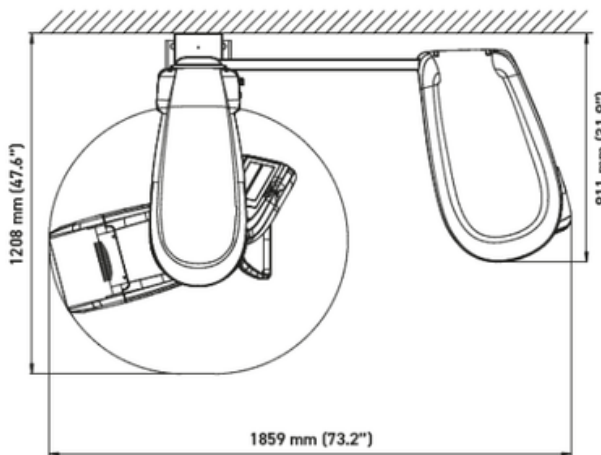

Dimension del espacio

2.50mts x 2.50mts x 2.50mts

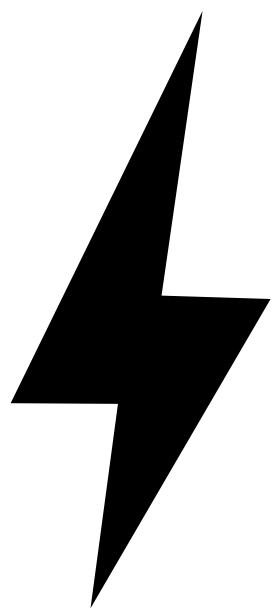


Voltaje: 220V


Frecuencia: 50/60 Hz

Consumo promedio: 1500-3000W

Linea electrica exclusiva con
conexion a tierra

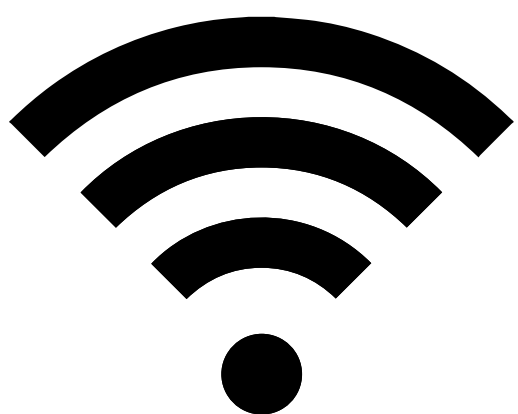

Conexion de red: velocidad
minima de 50 Mbps para
transferencia de datos

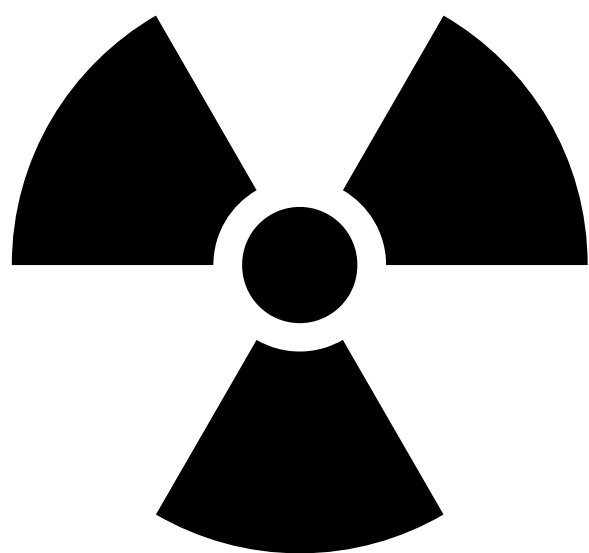

**Paredes con revestimiento
plomado**

Certificacion de blindaje

Señalización: Zona de radiacion

REQUISITOS PREINSTALACION

Tomar en cuenta los siguientes parametros para la instalacion del software en su computador

- Placa base con al menos una ranura PCI Express X16 libre
- Procesador Intel Core i5 de cuatro nucleos a 2,66 GHz * Memoria RAM de 8 GB
- Disco duro de 1TB + Tarjeta grafica con VRAM dedicada de al menos 1 GB + Sistema operativo Windows 10 de 64 bits + Red Gigabit Ethernet dedicada de un solo puerto

